

1



- › **ENCERCLER** le membre avec la bande en passant dans la boucle.
- › **POSITIONNER** à 5 cm au-dessus du site de saignement, directement sur la peau.

2



- › **SERRER** en tirant sur la bande jusqu'à ce qu'il soit impossible de passer 3 doigts.
- › **FIXER** le velcro.

3



- › **TOURNER** la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.

4



- › **BLOQUER** la tige à l'intérieur de l'attache.

5



- › **VÉRIFIER** l'absence de saignement/pouls distal.
- › **PLACER** un 2^e tourniquet au besoin.

6



- › **FIXER** avec la courroie TIME.
- › **ENREGISTREZ** l'heure d'application.

Rangement

