


STABILISATEUR DE BASSIN AVEC TPOD

Vidéo
démonstrative

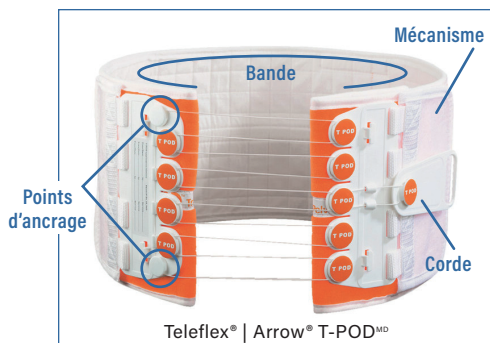

Indication

- › Suspicion de fracture du bassin
- › Choc inexplicable dans un contexte de trauma

Équipement

- › Stabilisateur de bassin
- › Bande de tissu

Procédure







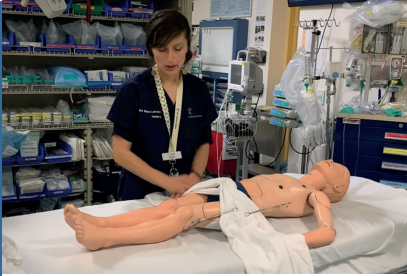

<p>1</p> <p>INSTALLER le stabilisateur sous le patient en passant la bande sous les genoux et faire remonter en pesant sur la civière afin de minimiser les mouvements du bassin (alternative : installer le stabilisateur sur la civière avant le transfert du patient).</p>	<p>2</p> <p>› POSITIONNER le centre de la bande au niveau des grands trochanters (IMPORTANT : et non vis-à-vis les crêtes iliaques).</p>	<p>3</p> <p>› COUPER la bande pour laisser une distance de 15-20 cm entre les 2 extrémités.</p>
<p>4</p> <p>› APPOSER les 2 côtés du mécanisme à l'aide du velcro.</p>	<p>5</p> <p>› TIRER la corde jusqu'à l'obtention d'une compression circonférentielle efficace. IMPORTANT : si les mécanismes se touchent, reprendre l'étape 4 en éloignant les berges du mécanisme sur le velcro.</p>	<p>6</p> <p>› FIXER la corde au travers des 4 points d'ancrage.</p>
<p>7</p> <p>› APPOSER l'extrémité de la corde sur le velcro.</p>	<p>8</p> <p>› INSCRIRE l'heure et la date de l'installation</p>	<p>9</p> <p>› ATTACHER les pieds en rotation interne des hanches à l'aide d'une bande de tissu.</p>

STABILISATEUR DE BASSIN AVEC DRAP

Vidéo
démonstrative

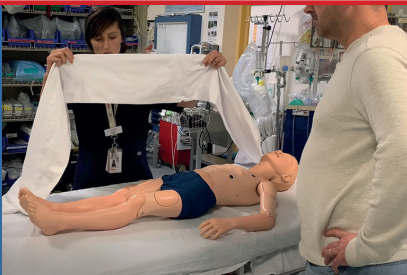

Procédure

<p>1</p>  <p>› PLIER un drap afin d'obtenir un bande de 20-30 cm de largeur.</p>	<p>2</p>  <p>› INSÉRER le drap sous le patient en le passant sous les genoux et faire remonter en pesant sur la civière afin de minimiser les mouvements du bassin (alternative: installer le drap sur la civière avant le transfert du patient.</p>	<p>3</p>  <p>› POSITIONNER le centre de la bande au niveau des grands trochanters (et non vis-à-vis les crêtes iliaques).</p>
<p>4</p>  <p>› CROISER les bandes au dessus du patient.</p>	<p>5</p>  <p>› STABILISER le drap en plaçant ses portions mobiles à plat sur le drap entourant déjà le bassin.</p>	<p>6</p>  <p>› FIXER les portions mobiles à l'aide de pinces métalliques en englobant toutes les épaisseurs du drap.</p>
<p>7</p>  <p>› POSITIONNER les pinces en supérieur et en inférieur de chaque côté.</p>	<p>8</p>  <p>› ATTACHER les pieds en rotation interne des hanches à l'aide d'une bande de tissu.</p>	

